

メニワン コーニアルバンデージワン

全4タイプ

タイプXS タイプS
タイプM タイプL



眼の形状になじみやすい
「高含水素材」を採用!
さまざまな犬種、猫種に適応!

【動物用】一般医療機器 **3枚入**

装着方法・
症例などの動画が
ご覧いただけます。



\\スケールもご用意しております!




:: 全タイプドット入り 特許出願中

レンズには青白色のドットがあり、
軽度の角膜浮腫においてはもちろん、
重度に混濁した角膜でもレンズの
装着状態の観察が容易です。


■ドット無しの場合



● ● ●
ドット有りの場合
タイプXS/タイプS

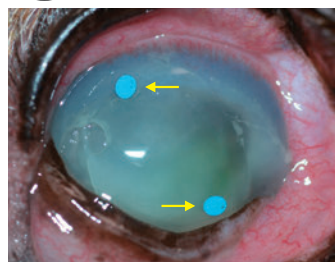

● ● ●
ドット有りの場合
タイプM/タイプL

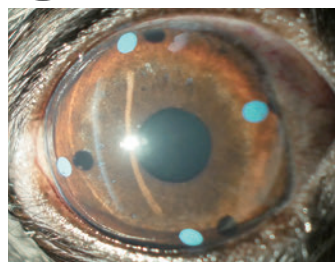


写真提供: アニマルアイケア・東京動物眼科醫院/小林義崇先生

——— こだわり高い安全性 ———

:: 色素が直接瞳にふれない オーバーフィルム製法

オーバーフィルム製法で、色素が直接瞳にふれることを防ぎます。装着中も、色素をしっかりガードし、表面に露出させません。

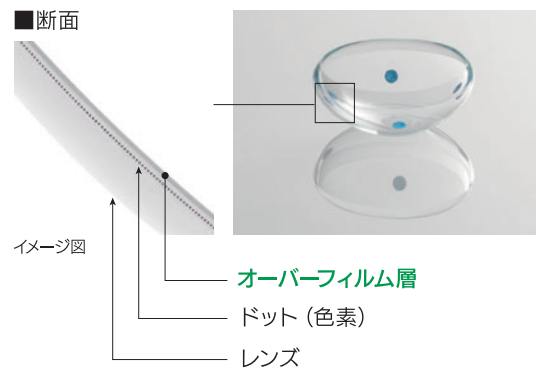

レンズの大きさ(内寸)イメージです。

L	M	S	XS
B.C. 9.70 mm DIA. 17.8 mm	B.C. 9.10 mm DIA. 15.8 mm	B.C. 8.60 mm DIA. 14.2 mm	B.C. 8.30 mm DIA. 13.5 mm

:: 効能効果

① 角膜保護と疼痛緩和

- ・角膜潰瘍(表層潰瘍、実質潰瘍、3mm以下のデスメ膜瘤)
- ・小さな角膜穿孔
- ・角膜フラップ術、角膜移植術などの術前後

- ・SCCEDs(自発性慢性角膜上皮欠損症)における角膜切開術、角膜表層切除術などの術前後
- ・眼瞼欠損症・内反症や異所性睫毛

② 創傷治癒促進効果

- ・角膜潰瘍における上皮再生促進効果
- ・急性角膜水腫におけるバンデージ効果
- ・猫の鼻気管炎による角結膜癒着剥離後などの再癒着防止



【適応が好ましくない症例】

径3mmを超えるデスメ膜瘤、融解性角膜炎、乾性角結膜炎、ドライアイ、小眼球症、眼球癆、角膜浮腫、ソフトコンタクトレンズにアレルギーのあるもの

:: 特徴

- 高含水素材による高いDk値と薄型デザインにより酸素透過性が優れています。
- 適度な弾力性による形状保持性があります。

		タイプXS	タイプS	タイプM	タイプL
レンズ規格	B.C. 曲率半径	8.30 mm	8.60 mm	9.10 mm	9.70 mm
	DIA. レンズの直径	13.5 mm	14.2 mm	15.8 mm	17.8 mm
物性値	含水率(20°C 0.9%NaCl 水溶液中)	72%			
	酸素透過係数(ISO法)	34×10 ⁻¹¹ (cm ² /sec)・(mLO ₂ /(mL×mmHg))			
	ドット(青白色)	2点		4点	
	適応種	猫 超小型犬		小型犬	中型犬 大型犬

:: 使用例

		タイプXS	タイプS	タイプM	タイプL
適応種(犬種別の例)		・チワワ ・トイプードル ・ミニチュアダックスフンド	・柴犬 ・猫 ※体重による	・シーズー ・コリー ・シベリアンハスキー ・ウエルシュ・コーギー	・ゴールデン・レトリバー ・ラブラドル・レトリバー ・ボクサー
体重(kg)(体重別の例)		3kg以下	5kg前後	6~9kg	10kg以上


※装用期間は、次回の診察時(数日から1週間程度)までを推奨しております。ただし、実際の病態に合わせてご判断ください。

:: レンズ表裏の区別 ※装用前には必ず確認してください。

ドット 2点

タイプXS


タイプS

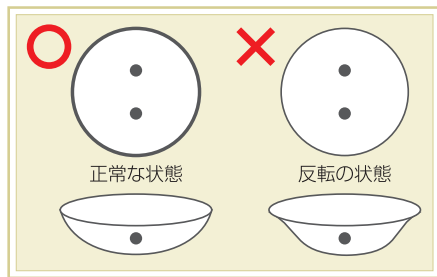

ドット 4点

タイプM

タイプL

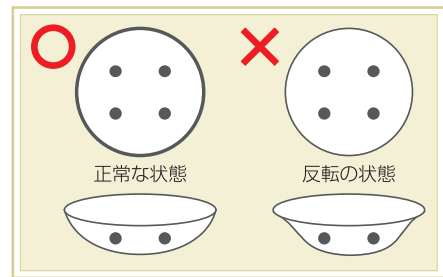

警告 動物用治療用コンタクトレンズです。ヒト用ではありませんので、ヒトには絶対に使用しないで下さい。再使用はできません。

販売業者

Meni-One

Menicon
GROUP

株式会社 メニワン
〒452-0805 名古屋市西区市場木町390番地
ミュキビジネスパーク四号館
TEL (052) 325-3823 FAX (052) 325-3843



取扱店

製造販売業者

株式会社メニコンネクト
〒452-0805 名古屋市西区市場木町390番地