

犬用 シリコンインプラント用

# メニわん シリコンボール

13種類のサイズを取り揃えております

サイズ	12mm～22mm / 24mm / 26mm
-----	-------------------------



※挿入機は附属  
しておりません。

## ☆シリコンボールの滅菌について

### 1 洗浄

オートクレーブでの滅菌前に、シリコンボールを洗剤（一般的な台所洗剤でOK）で洗浄し、それから洗剤を水道水で良く洗い流します。洗浄後すぐに、オートクレーブ用の滅菌バックに入れます。

### 2 滅菌

使用前にオートクレーブ滅菌を実施します。

※製品を繰り返しオートクレーブで処理した場合、まれに変色・砕け・ヒビ割れのような症状が発生する可能性があります。そのような、症状を確認した場合は製品を破棄して下さい。




**ご注意**

シリコンボールのEOG(エチレンオキシドガス)滅菌はお勧め致しません。

お問合せはコチラ

☎052-325-3823

Meni-One

株式会社 メニワン 

〒452-0805 名古屋市西区市場木町390番地  
ミュキビジネスパーク四号館  
TEL (052) 325-3823 FAX (052) 325-3843