

コーワ SL-19 専用アプリ バージョンアップのお知らせ

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

ポータブルスリットランプ コーワ SL-19 専用アプリのバージョンアップにつきまして、ご案内申し上げます。2025年3月26日にアップデートが公開されましたことをご報告いたします。

ご確認の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

バージョン 2.0.6

本バージョンでは以下の機能追加、修正を行いました。

◆ 機能追加

■ Wi-Fi 接続アップデート機能

- ・ SL-19 plus との継続的な Wi-Fi 接続のための機能追加。スリットランプ本体に保存されている Wi-Fi 接続のための DHCP アドレスの範囲を広げるアップデート機能を追加しました。

◆ 機能修正

■ 静止画提案画面

- ・ 静止画提案画面の視認性・操作性の向上のため、静止画提案画面の進捗サークルに処理のキャンセルラベルを表示するよう修正しました。

■ 不具合の修正

- ・ ライブ画面で録画中に前の画面に戻ってしまう場合がある不具合の修正をしました。
- ・ データ一覧画面で動画のサムネイルが表示されない場合がある不具合の修正をしました。
- ・ 静止画面で iPad 回転後に前後のページの初期サイズに回転後のサイズが反映されない不具合の修正をしました。
- ・ 静止画面で iPad 回転後に 1 倍未満・5 倍より大きいサイズになってしまう場合がある不具合の修正をしました。
- ・ その他の軽微な不具合の修正をしました。

ご使用の iPad®をインターネットに接続の上、以下の 2 次元コードを iPad®でスキャンし、本製品プロダクトページよりバージョンアップしてください。



App Store