

メニワンPLD

犬用
プリロード型
眼内レンズ




術中のストレスを減らし
再現性の高い手術を

:: 製品特長 ::

- 1 レンズを触らず
清潔なまま施術できる
プリロード型 IOL
- 2 紫外線吸収剤(結合型)を
配合
- 3 光学部と支持部は
疎水性軟性アクリル
- 4 光学部後面は
360°スクエアエッジ加工




:: 仕様 ::

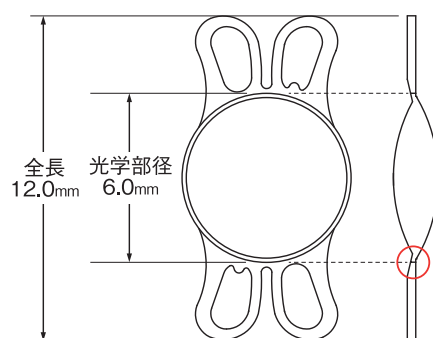


タイプ	PLD-12	PLD-13
全 長	12.0mm	13.0mm
光 学 部 径	6.0mm	6.0mm
レンズ厚み	1.30mm	1.30mm
レンズ度数	+41.0D	+41.0D

メニワンPLD セッティング方法


1 プロテクターの小孔部より
2～3滴BSS、粘弾性物質を入れます

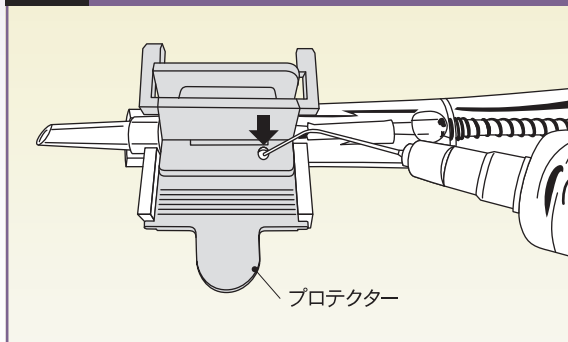


2 チャンバーとノズルを
粘弾性物質で満たします

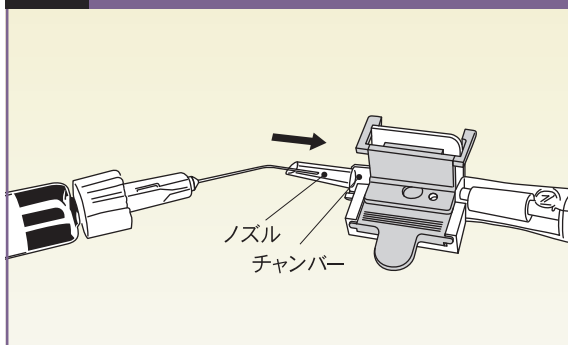


3 ウイングを軽く閉じると
プロテクターが外れます

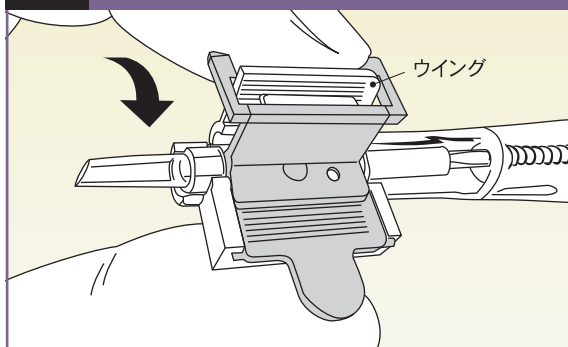


4 そのまま両手でウイングを閉じます

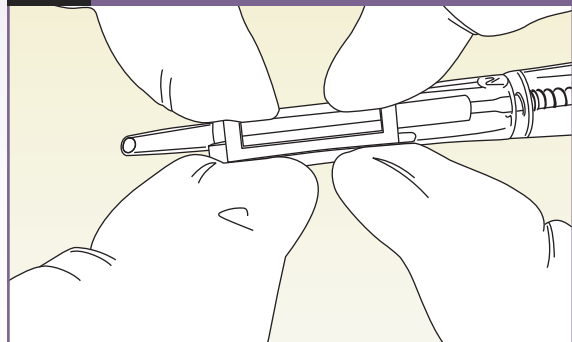

5 ウイング部を閉じたまま、レンズがノズル
に入るまでプランジャーを押します

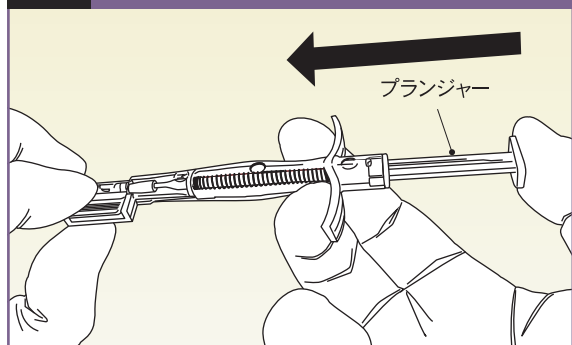

6 セット完了

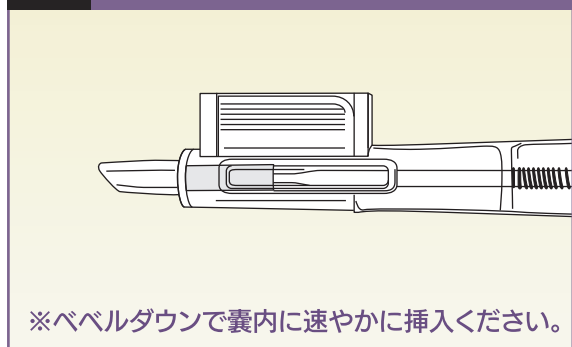

届出事項

区 分：動物用一般医療機器
販 売 名：メニワンPLD
製造販売業者：株式会社メニワン

類別・一般的名称：機械器具72 視力補正用レンズ
届 出 番 号：7 動薬第712 号
外国製造業者：an-vision GmbH (ドイツ連邦共和国)

お問い合わせはコチラ

☎052-325-3823

Meni-One

Menicon
GROUP

株式会社 メニワン

〒452-0805 名古屋市中西区市場木町390番地
ミュキビジネスパーク四号館
TEL (052) 325-3823 FAX (052) 325-3843
HP: <https://meni-one.com>



取扱店